

Barrières médicales

Niveau 3

StedAIR

MÉDICALE

Barrières chirurgicales haute performance pour les blouses et les systèmes de draps réutilisables

Stedair® TX L3

Barrières médicales Stedair® spécialement conçues pour la protection contre la pénétration des fluides tout en restant respirable pour fournir le confort des chirurgiens lors de longues procédures.

Type I - Tricot de polyester de 1,6 oz laminé sur un film ePTFE et sur un tricot de polyester de 1,1 oz.

Avantages du produit

- Résistant à la pénétration des fluides
- *Lavage durable - jusqu'à 75 cycles de stérilisation de lavage
- Haute respirabilité

SPECIFICATION	ANSI/AAMI PB70:2012	RÉSULTATS
Poids		3.8 oz/yd ²
CAN/CGSB-4.2 N° 5.1		
Résistance à la déchirure		W: 30 N F: 20 N
ASTM D 5587		
Résistance à la rupture		W: 70 lbf F: 70 lbf
ASTM D 5034		
Résistance à l'évaporation d'eau		2 000 g/m ² /24 hrs
ASTM E-96 method BW		
Absorption de l'eau	≤1.0 g	PASSE
AATCC 42		
Pression hydrostatique	≥50cm	PASSE
AATCC 127		
Norme pour l'inflammabilité des produits textiles - tel que reçu	Comportement : DNI Classification : 1	Comportement : DNI Classification : 1

16 CFR PART 1610 (1-1-19 Edition)

RECOMMANDATIONS DE LAVAGE

- Vérifiez tout l'équipement pour vous assurer qu'il n'y a pas d'objet contondant qui pourrait endommager le matériel.
- Ne surchargez pas l'équipement ; 75-80% de la capacité est optimale.
- La température ne doit pas dépasser 160°F (71°C) pour les opérations de lavage.
- Ne pas repasser.
- Ne pas utiliser d'hypochlorite de sodium (agent de blanchiment) comme désinfectant. Si un agent désinfectant est nécessaire, utiliser du peroxyde d'hydrogène (35%) à une concentration de 150 ppm, PH 10,5 maximum.
- Un essoreur à diaphragme peu endommager le Stedair® TX L3.
- Au séchage évitez les températures excessive et trop de temps d'exposition. Assurez-vous d'incorporer une période de refroidissement adéquate et plier les le tissu immédiatement après le séchage pour éviter le froissement.
- La température de stérilisation ne doit pas excéder 132°C. Nous recommandons fortement l'implantation d'un programme d'Assurance Qualité pour vérifier les performances des produits fabriqués avec le Stedair® TX L3.



En respectant les recommandations de lavage du fabricant ci-dessus, Stedair® TX L3 pourrait effectuer jusqu'à 75 cycles de lavage et de séchage.

AVERTISSEMENT

Les informations présentées ici reflètent les performances du Stedair® TX L3 dans des conditions de laboratoire contrôlées.



Stedfast

CHEF DE FILE EN TISSUS BARRIÈRES

450-378-8441

STEDFAST@STEDFAST.COM

